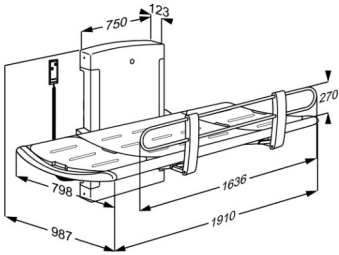




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Bruseleje 3000, elektrisk højderegulérbar R8538021
Farve	VVS: 777540584 NRF: 7501906 EAN: 5708590275505 HMI: 46571 NBS: N13:40,375 Blygrå
Produktbeskrivelse	 Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 3000 serien har et stilfuldt og prisbelønnet design med fokus på komfort og brugervenlighed. Bruseleje 3000, elektrisk højderegulérbar 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Opklappelig. Inkl. sengehest og vandopsamlingsbakke med integreret afløb.
Udvendige mål: 1025 mm x 1910 mm. Materialer: Pulverlakeret stål, aluminium, PUR-skum og polystyren. Ekskl. monteringskraver til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	700 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 200 kg. Når briksen belastes med 200 kg, belastes hver monteringsbolt med 26 kg <i>Briksen er testet statisk med 500 kg, i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandards.</i>
Hastighed opad	Hastighed op: 15 mm/s Hastighed ned: 20 mm/s



Produkt	Bruseleje 3000, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8538021
Støjniveau	48 dB
Materialer	Aluminium, porsukum, kunststof og lakeret stål.
Ergonomi	• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, badning, tørring, skiftning og påklædning af brugeren. • Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. • Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.
Funktioner	• Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Slangen fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. • Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed. • Indstillelig nakkestøtte, der kan placeres i begge ender. • Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. • Det elektriske bruseleje leveres med håndbetjening. De røde knapper indikerer tydeligt "op" og "ned". • Håndbetjeningen leveres med en praktisk holder til placering på væg.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Careline, (Linak), 6000 N, IPX6
Styreboks	CB9 Careline, 24V med jord, IPX6
Håndbetjening	HB3 (Linak), IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W Strømforbrug, standby: 2 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.



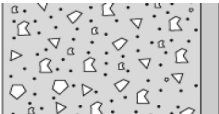
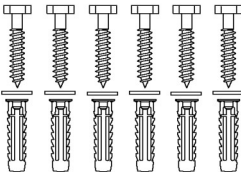
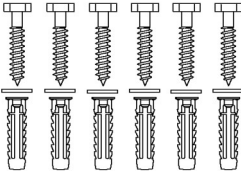
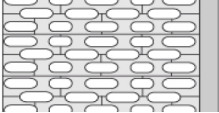
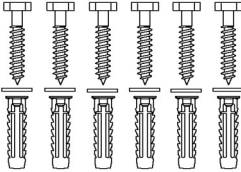
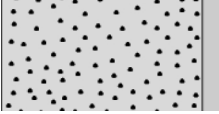
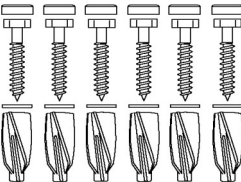
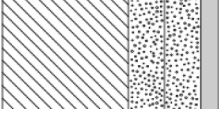
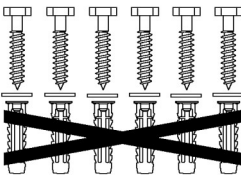
Produkt	Bruseleje 3000, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8538021
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: WipeClean Ethanol Disinfection 80% Wetwipe Ethanol Disinfection 70% Accel PREvention Wipes Lingettes IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetwipe Universal Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

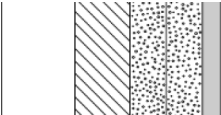
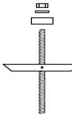
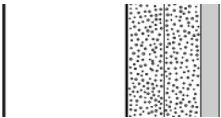
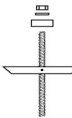
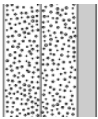
Produkt	Bruseleje 3000, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8538021

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Bruseleje 3000, elektrisk højderegulérbar R8538021		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com